

Style Italiano Gruppe

Gegründet von Walter Devoto DDS und Angelo Putignano MD, DDS

Style Italiano ist eine Studiengruppe leidenschaftlicher Behandler und Forscher, die sich auf die ästhetische restaurative Zahnmedizin spezialisiert haben. Weitere Informationen unter www.styleitaliano.org und www.facebook.com/styleitaliano.



LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
21601 Parainen, Finnland
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com

LMGengiva

Gingivalretraktorset

LM 7556 K

LM-MultiHolder PK III / LM-Gengiva Handinstrument


LM 752-756 XSI



LM-Gingivalretraktoren (blau)

LM 7500

Sortierte Packung mit ca. 90 St.
Drei Größen (30 St. pro Größe)

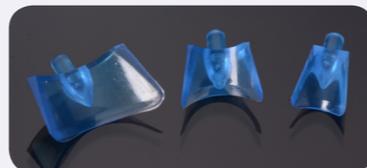

LM-MultiLever

LM 7550

Zur Entfernung von Einweg-Gingivalretraktoren



1114

LMGengiva



Die Herausforderung der
Gingivaretraktion meistern

LM

feel the
difference



Zervikale Restaurationen – die Herausforderung in Sachen Retraktion

Retraktionen stellen immer eine Herausforderung dar. Eine mechanische Retraktion kann für das Zahnfleisch traumatisch sein, wenn sie nicht richtig durchgeführt wird. Die Verwendung des speziellen LM-Gengiva Gingivalretraktorsets hat viele Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Kofferdam und Retraktionsfäden.

LM-Gingivalretraktoren werden mit dem LM-Gengiva Instrument verwendet. Die blauen Arbeitsenden aus Kunststoff passen sich bei verschiedenen Zähnen eng an den Zahnfleischrand an.

Vorteile der LM-Gingivalretraktoren

- Bessere Adaption dank der flexiblen Kunststoffspitzen
- Optimaler Kontrast zum Weichgewebe
- Starke Retraktion möglich aufgrund des harten Kunststoffs
- Mögliche Individualisierung mit Bohrern
- Einmalprodukt
- Kein Kleben der Adhäsive an der Oberfläche der Spitzen
- Keine signifikante Beeinträchtigung der Polymerisation



Klinischer Fall

Eine klinische Situation, in der eine nicht kariöse zervikale Läsion restaurativ behandelt werden muss. Ziel ist es, eine perfekte Randversiegelung, einen starken Verbund und eine optimale Politur für das Kompositmaterial zu erreichen. LM-Gingivalretraktoren werden verwendet, um eine unnötige Verletzung des Zahnfleischs zu vermeiden und das beste klinische Ergebnis zu erzielen.



Gingivaretraktion

Der Gingivalretraktor hält die Gingiva von der Restauration ab. Aufgrund der leichten Elastizität der Kunststoffspitze ist unter Druck eine bessere Adaption möglich. Die Spitze fungiert als feste Verbindung zwischen Zahnfleisch und Zahn. Sie schützt das Zahnfleisch und verringert das Debonding-Risiko. Die Verbundgrenze und der Zahnfleischrand sind optimal zu sehen.



Nach der Restauration

Nach Abschluss der Kompositrestauration wird der Retraktor wieder eingesetzt, um das Weichgewebe vor Bohren und abrasiven Gummipolierern zu schützen. Dabei lässt er die Finierer die Grenzen der Restauration erreichen.



Entfernung von überschüssigem Material

Das feine LM-Arte Eccesso Instrument wird zur Entfernung des überschüssigen Klebe- und Kompositmaterials verwendet. Sein Arbeitsende hat eine optimale Länge, Dicke und Breite. Das Instrument ist für die Entfernung von Rückständen aus dem Zervikalbereich oder dem Interproximalraum ideal geeignet. Anschließend werden verschiedene Arten von Finierern und Gummipolierern eingesetzt.



Fertige Restauration

Mit dieser Methode, d. h. durch die Verwendung von Gingivalretraktoren wird das gewünschte Endergebnis erreicht. Das Weichgewebe wird nicht verletzt, und die ästhetischen Anforderungen werden erfüllt.

Klinischer Fall von Dr. Walter Devoto und Dr. Jordi Manauta



Scannen Sie den QR-Code, um den ganzen Fall zu studieren.

