

Groupe Style Italiano

Fondé par Walter Devoto DDS et Angelo Putignano, MD et DDS

Style Italiano est un groupe d'étude composé de cliniciens et de chercheurs passionnés spécialisés dans la dentisterie restauratrice esthétique. Pour plus d'informations, consultez les sites www.styleitaliano.org et www.facebook.com/styleitaliano.



LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
21601 Parainen, Finlande
Tél. : +358 2 4546 400
Fax : +358 2 4546 444
info@lm-dental.com
www.lm-dental.com

LMGengiva

Kit de rétraction gingivale

LM 7556 K

Instrument à main LM-MultiHolder PK III/LM-Gengiva


LM 752-756 XSI



Rétracteurs LM-Gingival (en bleu)

LM 7500

Assortiment de 90 pièces environ
Trois tailles (30 pièces/taille)

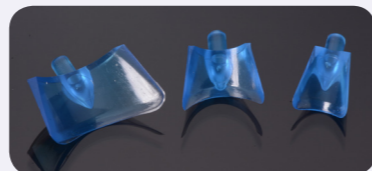

LM-MultiLever

LM 7550

Pour l'élimination des rétracteurs gingivaux jetables



Contactez votre fournisseur local

1114

LMGengiva



Relever le défi de la rétraction gingivale

LM

feel the difference



Les restaurations cervicales sont ce qu'il y a de plus difficile en matière de rétraction

La rétraction relève toujours du défi, et une rétraction mécanique, si elle n'est pas correctement réalisée, peut traumatiser la gencive. L'utilisation du kit spécial de rétraction gingivale LM-Gengiva offre de nombreux avantages par comparaison avec les digues en caoutchouc et les fils à rétracter classiques.

Les rétracteurs LM-Gingival sont utilisés en association avec l'instrument LM-Gengiva. Les extrémités utiles en plastique bleu s'adaptent fermement au rebord gingival des différentes dents.

Avantages des rétracteurs LM-Gingival

- Les embouts en plastique offrent une certaine flexibilité pour une meilleure adaptation
- Contraste parfait avec les tissus mous
- La dureté du plastique permet une rétraction solide
- Possibilité de personnalisation avec des fraises
- Jetable
- Aucune adhérence des matériaux adhésifs à la surface des embouts
- Aucune interférence significative avec la polymérisation



Cas clinique

Cas clinique présentant une lésion cervicale non carieuse nécessitant une restauration. L'objectif est d'obtenir un rebord parfaitement étanche, une forte liaison et un polissage optimal du matériau composite. Les rétracteurs LM-Gingival sont utilisés pour éviter de blesser inutilement la gencive et obtenir le meilleur résultat clinique possible.



Rétraction gingivale

Le rétracteur gingival permet de rétracter la gencive à l'issue de la restauration. La faible résilience de l'embout en plastique permet de l'adapter plus facilement à l'exercice d'une pression. L'embout fait office de joint étanche entre la gencive et la dent. Il protège la gencive et diminue le risque de décollement. L'interface de liaison et le rebord gingival sont parfaitement visibles.



Après la restauration

Au terme de la restauration composite, le rétracteur est remis en place pour protéger les tissus mous des fraises et gommages abrasives tout en laissant suffisamment de place pour que les instruments de finition puissent atteindre les rebords des restaurations.



Retrait de l'excédent

L'instrument fin LM-Arte Eccesso est utilisé pour éliminer tous les matériaux de liaison et composites en excès. La longueur, l'épaisseur et la largeur de l'extrémité utile de l'instrument sont optimisées. Ce dernier convient parfaitement au retrait des résidus de la région cervicale ou interdentaire. Ensuite, différentes sortes de fraises et de gommages de finition sont utilisées.



Restauration terminée avec succès

Grâce à cette méthode des rétracteurs gingivaux, vous atteignez le résultat final escompté. Les tissus mous ne sont pas endommagés et les exigences esthétiques sont satisfaites.

Cas clinique des Dr. Walter Devoto et Dr. Jordi Manauta



Numérisez le code QR pour étudier l'intégralité du cas.

