

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
Settimana 1	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 2	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 3	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 4	ora min. <input type="checkbox"/>						
Sono già trascorse le prime quattro settimane! Ricordati di fotografare i denti!							
Settimana 5	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 6	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 7	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 8	ora min. <input type="checkbox"/>						
Fai un'altra foto dei denti. Riesci già a vedere il cambiamento?							
Settimana 9	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 10	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 11	ora min. <input type="checkbox"/>						
Settimana 12	ora min. <input type="checkbox"/>						
Sono trascorse dodici settimane! Fai un'altra foto ancora e vedi la differenza.							



"HA FUNZIONATO BENISSIMO! AVEVO QUASI 1 CM DI OVERJET E QUANDO HO FINITO ERA DIMINUITO A CIRCA 3 MM. HA FUNZIONATO SUL SERIO!"

Ragazza, 14 anni, Svezia

Čirgić, E., Kjellberg, H., Hansen, K., & Lepp, M. (2015). Adolescents' experiences of using removable functional appliances. Orthodontic & craniofacial research

Contatta il tuo dentista per istruzioni più dettagliate.

LMDental™
LM-Instruments Oy
Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen, Finlandia
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com



LMActivator™ È UN DISPOSITIVO REALIZZATO IN SILICONE MEDICALE CHE FUNZIONA COME ATTIVATORE E ALLINEATORE DENTALE.

Stimola il corretto sviluppo dentale e mandibolare dei bambini. Se un dente non sta erompendo correttamente, LM-Activator™ funziona da guida per promuoverne delicatamente la corretta posizione. Allo stesso tempo, LM-Activator™ supporta lo sviluppo naturale del viso perché controlla anche la relazione tra mascella e mandibola.

Intervenire immediatamente quando viene rilevato un piccolo problema può essere importante per evitare che peggiori diventando grave. LM-Activator™ funziona come una guida delicata per la corretta posizione dei denti e della mandibola evitando e correggendo eventuali sviluppi non sani.

0621 M1062IT L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche | Brev. www.lm-dental.com/patents

MD €€

COME USARLO LMActivator™

feel the
difference

LM




LMDental™

Cos'è LM-Activator™?

LM-Activator™ consente ai tuoi denti di ritrovare la posizione corretta

- quando stanno crescendo nuovi denti
- quando un dente non è nella posizione corretta

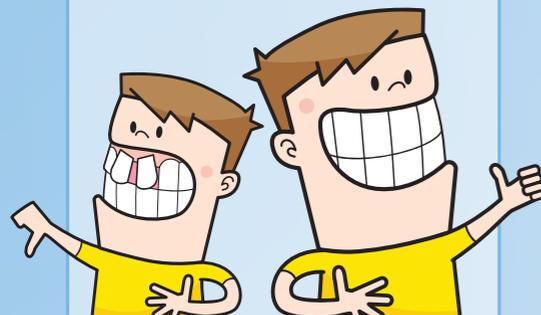

Contribuendo a mantenere la mandibola al posto giusto, LM-Activator™ aiuta il viso a svilupparsi e a crescere in modo sano.



Se la lingua è adagiata sul fondo della bocca, LM-Activator™ aiuta la lingua a trovare il palato.

Se un dente è già al posto giusto, LM-Activator™ fa in modo che rimanga al posto giusto.

Come posso usare LM-Activator™?

Controlla che non sia sottosopra.
Posiziona LM-Activator™ in bocca e chiudi le labbra.



Segui le istruzioni del dentista:

Uso di giorno: Sì Ore
 No

Uso di notte: ogni notte mentre dormi.

Altre istruzioni:

Porta LM-Activator™ e il diario con te all'appuntamento dal dentista.

Tieni i tuoi denti all'interno di LM-Activator™ ma non masticare o muovere la mandibola avanti e indietro.



Contatta il dentista se:

- Hai bisogno di aiuto per utilizzare il dispositivo o per seguire le istruzioni.
- LM-Activator™ si rompe.
- Avverti sfregamento o pressione per diversi giorni/settimane.


Come iniziare

Più usi LM-Activator™, più diventa facile!

Ti abituerai presto a questo dispositivo e non lo dimenticherai più.

Durante il giorno, usa LM-Activator™, per esempio mentre guardi la TV, giochi o fai i compiti.

All'inizio la tua bocca può stancarsi proprio come in qualsiasi altro tipo di allenamento.

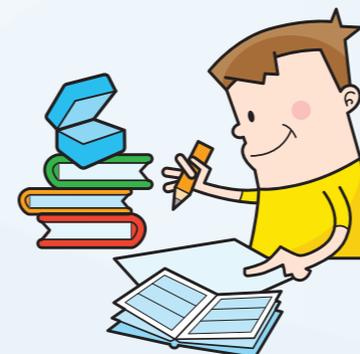

Tutto normale, questa sensazione sparisce presto.

Prima di abituarti, LM-Activator™ potrebbe cadere mentre dormi:

- Esercitati a usare LM-Activator™ anche durante il giorno.
- Chiedi ai tuoi genitori di riposizionare LM-Activator™ nella tua bocca se notano che è caduto. Di solito è facile addormentarsi di nuovo.

Crea una routine

Il cervello segue le abitudini quasi automaticamente. Quando avrai usato LM-Activator™ ogni sera per quattro settimane, sarà ormai diventata un'abitudine!



Sarà facile da ricordare se metti sempre LM-Activator™ in bocca subito dopo aver fatto qualcosa che fai ogni sera (per esempio dopo esserti lavato i denti, aver messo il pigiama o aver spento la luce).

LM-Activator™ sposta i denti gradualmente ogni notte. Se te ne dimentichi, i tuoi denti cercheranno di tornare nella posizione precedente.

Quando prepari le tue cose per passare la notte fuori, ricordati di LM-Activator™.



Annota i tuoi progressi


Compila la tabella o usa un'applicazione come Habitica, Coach.me, HabitSeed, chain.cc o Habitforge.

Stabilisci un'auto-ricompensa, per es. dopo tre settimane di utilizzo.

Fotografa ai tuoi denti ogni mese per osservare il cambiamento.



Sfoggia un sorriso sano!

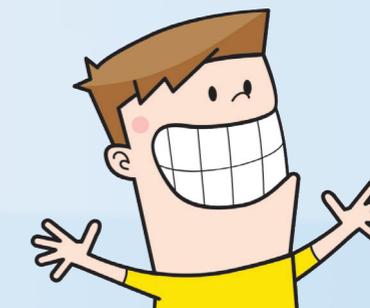

Sempre fresco e pulito

Risciacqua LM-Activator™ prima e dopo l'uso. Quando necessario:

- Pulisci con uno spazzolino da denti senza dentifricio.
- Disinfetta in acqua bollente. (almeno 1 minuto)
- Lava la custodia in lavastoviglie.

