

LMarte™

LM

feel the
difference



FORME MÄSTERVERK



LMArte™ restaurationsinstrument

LYCKAD ESTETIK VID SKIKTTEKNIK

LM-Arte™ är en uppsättning innovativa instrument för restaurering av tänder och har utformats speciellt för kompositupbyggnad genom skiktteknik. Varje tandinstrument är märkt med en färg och namngivet enligt sin funktion. På så vis blir det lätt för dig att genomföra enkla, funktionella och snabba behandlingar. De lätta och ergonomiska LM™-skaften och spetsarna som utformats av högkvalitativa material gör att instrumenten är lätthanterliga och hjälper dig att uppnå utmärkta behandlingsresultat.

SAMARBETE MED STYLEITALIANO™


Instrumentserien LM-Arte™ har utvecklats i samarbete med Styleitaliano™ - en grupp skickliga tandläkare som delar vår passion för utveckling av suverän tandvård.

Projektet Styleitaliano™ uppstod som en inspirerande idé hos två goda vänner – Walter Devoto och Angelo Putignano. Dessa berömda experter inom traditionell och estetisk tandvård lade märke till att det visserligen fanns gott om lämpligt material tillgängligt för att skapa snygga tandvårdsresultat, men att det också fanns en brist på bra instrument för att tillämpa materialen. Med engagemanget från LM-Dental™ att tillverka excellens utvecklades det unika konceptet med LM-Arte™-instrument, och det har varit ett genombrott inom estetisk tandvård.



BLI EN DEL AV FRAMGÅNGEN!

Besök Styleitaliano™-webbplatsen på www.styleitaliano.org för att läsa om behandlingsfall och restaureringar med LM-Dental™-instrument

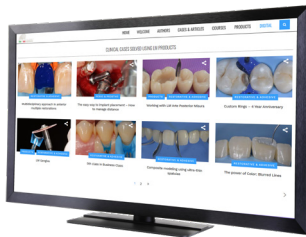

Följ och gå med i Styleitaliano™-gruppen på sociala medier



Styleitaliano™ är en växande grupp skickliga tandläkare som bidrar med nya idéer i syfte att förenkla och effektivisera vardagliga tandvårdsrutiner. Via sociala medier når de idag ut till tusentals tandläkare med illustrativa demonstrationsvideor, föreläsningar, kurser och konferenser.



BESÖK WEBBPLATSEN
på www.lm-dental.com/LM-Arte
och var en del av framgången!

FORMGE MÄSTERVERK



STORT UTBUD AV TANDINSTRUMENT



LM-Arte™ Applica

LMErgoSense®	46-49ES
LMErgoMax™	46-49XSI



LM-Arte™
Applica Twist

LMErgoSense®	464-494ES
LMErgoMax™	464-494XSI



LM-Arte™ Modella

LMErgoSense®	442-443ES
LMErgoMax™	442-443XSI



LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense®	488-489ES
LMErgoMax™	488-489XSI



LM-Arte™ Misura

LMErgoSense®	496-497ES
LMErgoMax™	496-497XSI



LM-Arte™
Posterior Misura

LMErgoSense®	498-499ES
LMErgoMax™	498-499XSI



LM-Arte™
Cusp Misura

LMErgoSense®	468-469ES
LMErgoMax™	468-469XSI



LM-Arte™ Fissura

LMErgoSense®	481-487ES
LMErgoMax™	481-487XSI



LM-Arte™ Eccesso

LMErgoSense®	307-308ES
LMErgoMax™	307-308XSI



LM-Arte™
Solo Anterior

LMErgoSense®	431-433ES
LMErgoMax™	431-433XSI



LM-Arte™
Solo Posterior

LMErgoSense®	434-438ES
LMErgoMax™	434-438XSI



LM-Arte™
Replica Posterior

LMErgoSense®	448-449ES
LMErgoMax™	448-449XSI



LM-Arte™
Replica Anterior

LMErgoSense®	451-452ES
LMErgoMax™	451-452XSI

NYHET!

UTVALDA INSTRUMENTUPPSÄTTNINGAR FÖR DINA HÖGKVALITATIVA RESTAURERINGAR



LM-Arte™ Set

Komplett uppsättning till behandling av bakre tänder i LM-Servo™ 5-kassett, där det ingår

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6840ES

LMErgoMax™ 6840XSI



LM-Arte™ Posterior Set

Komplett uppsättning till behandling av främre tänder i LM-Servo™ 5-kassett, där det ingår

- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6844ES

LMErgoMax™ 6844XSI



LM-Arte™ Complete Set

Komplett instrumentkit till all slags behandlingar i LM-Servo™ 8-kassett, där det ingår

- LM-Arte™ Eccesso
- LM-Arte™ Misura
- LM-Arte™ Applica
- LM-Arte™ Posterior Misura
- LM-Arte™ Cusp Misura
- LM-Arte™ Fissura
- LM-Arte™ Modella
- LM-Arte™ Condensa

LMErgoSense® 6848ES

LMErgoMax™ 6848XSI

Skaftalternativ



LMErgoSense®


Alla LM-Arte™ -instrument finns tillgängliga med LM-ErgoSense®-skaft med större diameter och design som ger exceptionellt grepp som har visat sig vara ergonomiskt och effektivt i vetenskapliga kliniska tester. Ø 13,7 mm

LM-ErgoSense®-skaft finns tillgängligt med inbyggd LM DTS™ RFID-tag, som innebär extra funktionalitet för bättre hantering av tillgångar och patientsäkerhet. Läs mer på www.dentaltracking.com



LMErgoMax™

Obelagda instrument finns också tillgängliga med den klassiska LM-ErgoMax™ ergonomiska skaftdesignen som fungerar väl i alla kliniska förfaranden och garanterar utmärkt taktill känslighet. Ø 11,5 mm

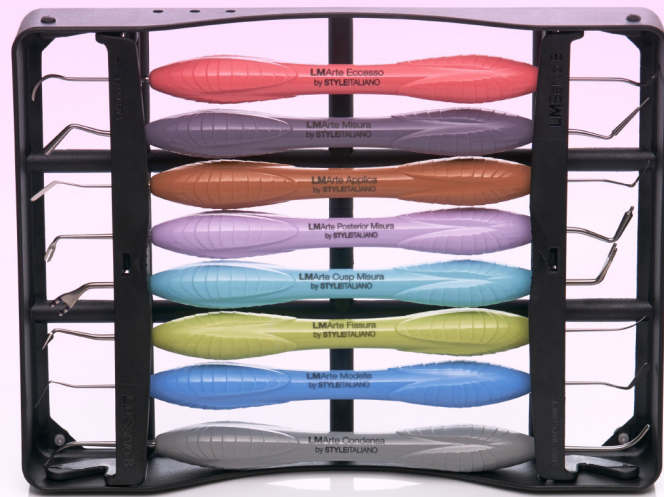


LMArte™ Dark Diamond-utgåvan

BEHAGLIG OCH EXAKT SKULPTERING AV KOMPOSIT

LM-Arte™ Dark Diamond-instrumenten är det senaste resultatet av samarbetet mellan StyleItaliano™ och LM-Dental™, med en exklusiv beläggning för jämn och exakt "non-stick"-placering och skulptering av komposithartser.

Vad säger de kliniska experterna?
Skanna QR-koden!

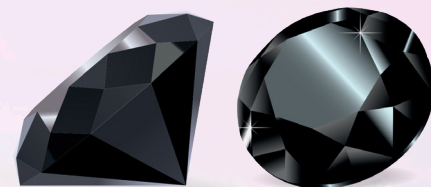

Känsligheten, flexibiliteten och precisionen är densamma som med konventionella LM-Arte™-instrument, men LM Dark Diamond™-beläggningen eliminerar problemet med att komposit fastnar på spatlar, även för den mest känsliga komposit.”

Dr. Paulo Monteiro, Hedersmedlem i StyleItaliano™

LMDark Diamond™ erbjuder unika fördelar!

- Modern diamantliknande kolbeläggning (DLC) minskar klubbigheten för jämn kompositplacering
- Hård yta som skyddar spetsen från repor
- Slät yta för enkel rengöring
- Mörk beläggningsfärg för minimala reflektioner och maximal kontrast mot fyllning
- Ergonomic LM-ErgoSense®-skaft för utmärkt precision och känsla

LM-Arte™ Dark Diamond set

Set med LM-Arte™-instrument med exklusiv "non-stick" LM Dark Diamond™-beläggning i LM-Servo™ 5-kassett inklusive Eccesso DD-, Modella DD-, Fissura DD-, Applicata DD- och Condensa DD-instrument

LM-ErgoSense® 6845ES



PRODUKTSORTIMENT MED "NON-STICK"-BELÄGGNING



LM-Arte™ Eccesso DD

LM-ErgoSense® 307-308DDES



LM-Arte™ Modella DD

LM-ErgoSense® 442-443DDES



LM-Arte™ Fissura DD

LM-ErgoSense® 481-487DDES




LM-Arte™ Applicata DD

LM-ErgoSense® 46-49DDES



LM-Arte™ Condensa DD


LM-ErgoSense® 488-489DDES

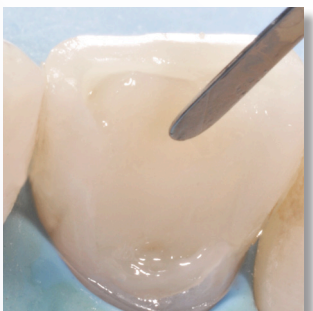

APPLICERA FLEXIBELT LM-Arte™ Applicator

En mycket smal och flexibel spatel för hantering och estetisk modellering av komposit. Med den flexibla spetsen kan man varsamt formge kompositskikten så att de motsvarar tandens naturliga former. Applicators tunna spets används vid modellering i trånga partier eller mot matrisbandet. Instrumentet är tillgängligt med "non-stick" LM Dark Diamond™-beläggning.


HOW TO USE

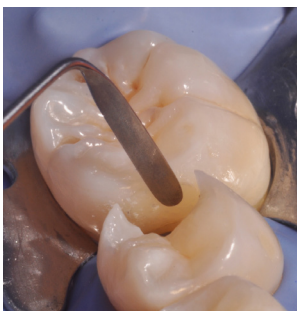

APPLICERA MED EN VRIDNING LM-Arte™ Applicator Twist

En fin, flexibel och smal spatel för kompositmodellering. Med Applicator Twist blir det mycket lätt att modellera i approximala utrymmen och marginala kanter i matrisen. Med de vinklade spetsarna kommer du åt mycket svåråtkomliga ytor, utan att arbetspositionen för handen onödigt försämras.

HOW TO USE

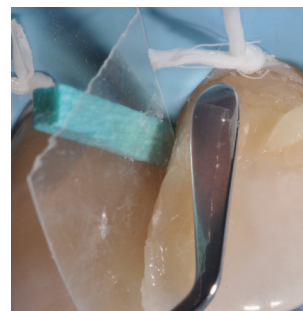

MODELLERA FLEXIBELT LM-Arte™ Modeler

Extra fin, vid spatel för uppbyggnad av komposit. Passar särskilt bra till bredare tandtyper som munnpartier vid framtänderna. Den breda spatelspetsen används för att jämna ut kompositmaterialet. Den flexibla, varsamma och vassa spetsen gör att estetiska detaljer kan utformas med precision. Spateln fungerar utmärkt för att applicera komposit från en spruta. Instrumentet är tillgängligt med LM Dark Diamond™-beläggning.

HOW TO USE






TRYCK FÖRSIKTIGT

LM-Arte™ Condensa

En lång och rundad stoppare, särskilt utformat för kompositmodellering. Instrumentets vinklade delar ger obegränsad åtkomst även vid svåråtkomliga håligheter. Condensa har både en tjock och en tunn spets som kan användas för olika stora håligheter både i främre och bakre partier. Den runda instrumenttanden möjliggör en sammanpressning av kompositmaterial, helt utan risk för att fastna. Instrumentet är tillgängligt med "non-stick" LM Dark Diamond™-beläggning.

HOW TO USE

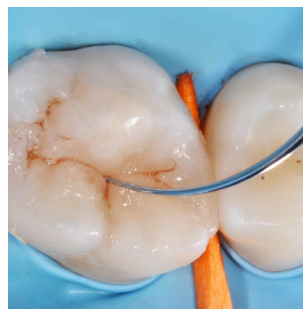

FÖRSIKTIG FORMGIVNING

LM-Arte™ Fissura

Formgivningsverktyg med två extremt vassa spetsar. Du behöver bara använda ett enda instrument om du väljer detta verktyg med konformad spets för att formge ocklusala ytor hos de bakre tänderna. Instrumentets smala fondliknande spets är perfekt för att formge fissurer och mamelonier samt för att belägga skikt av komposit eller sealer. Fissura-instrumentets elasticitet gör det möjligt att varsamt kontrollera att inga häftmaterialsrester stannat kvar på tandytan. Instrumentet är tillgängligt med "non-stick" LM Dark Diamond™-beläggning.

HOW TO USE





LM-Arte™ Cusp Misura hjälper dig att besluta om en kusp ska förberedas och om den ska täckas eller inte. Täckningen av kusen kan genomföras direkt och LM-Arte™ Posterior Misura möjliggör ingrepp med direkt uppbyggnad av kusen.





UTVÄRDERA TYDLIGT

LM-Arte™ Cusp Misura

Ett unikt verktyg som används till att uppskatta kuspens tjocklek och höjd och utvärdera behovet av tandkuspförberedelse för fixering och restauration. Passar perfekt vid utvärdering av den naturliga tandstrukturens resistenskraft och val av restaureringsteknik. Om spetsen på gaffelinstrumentet når hela vägen ner till spetsens märken är tandstrukturen försvagad att stå emot okklusion vid direkt restaurering. Andra behandlingsalternativ måste övervägas.

HOW TO USE

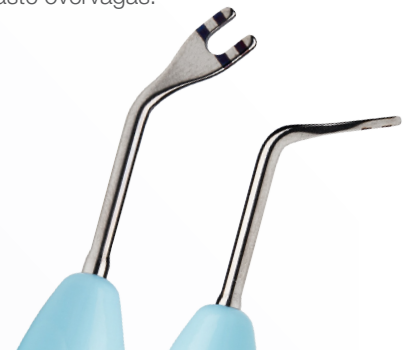

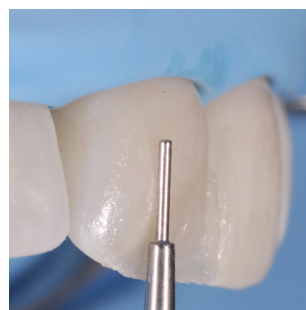

GÖR EN JÄMN FYLLNING

LM-Arte™ Posterior Misura

Posterior version av det populära Misurainstrumentet. Utformad för att kunna uppnå perfekt horisontell och vertikal tjocklek hos kompositskikten vid posteriora restaurationer. Instrumentets gaffelformade ände möjliggör modellering av den proximala väggen för att kopiera den angränsande tandens höjd och anatomi med närvaro av en matris.

HOW TO USE



APPLICERA JÄMNT

LM-Arte™ Misura

Ett enastående instrument för att applicera lager av kompositmaterial med perfekt tjocklek horisontalt och vertikalt vid restaurering av framtänder. Efter att skikten applicerats och innan polymerisering av

dentinkompositen, placeras den tunnare, cylinderformade spetsen på tandemaljen. På så vis modelleras försiktigt det återstående opolymeriserade kompositskiktet under den koniska spetsen och ett optimalt utrymme lämnas för emalkompositskikt. Misura-instrumentets tjocka, korta ände placeras horisontalt på den preparerade kavitetens kant så att spetsens ände ligger på den ursprungliga emaljen. Detta fastställer rätt mängd transparent komposit att applicera på översta skiktet. Estetisk restauration uppnås med en jämn balans mellan opak och genomskinlig komposit, vilket gör att grå effekter av kompositen undviks.

HOW TO USE



INSTRUMENTDUO FÖR FÖRENKLING AV DINA DAGLIGA FALL


LMArte™ Solo Anterior och Posterior


LM-Arte™ Solo-tandläkarverktyg är perfekta för att förenkla tandläkarens dagliga fall: med endast två instrument kan du utföra de flesta avancerade anteriora och posteriora tandrestaurationerna.

Dessa instrument förenklar allt från modellering till ergonomi och till och med hygien, med färre instrument som behövs på brickan. Effektivisera behandlingen med dessa två verktyg, som är allt du behöver använda vid dagliga anteriora och posteriora kompositfyllningar.

HOW TO USE

Skanna QR-koden för videon
hur man använder LMArte™
Solo-instrumentet

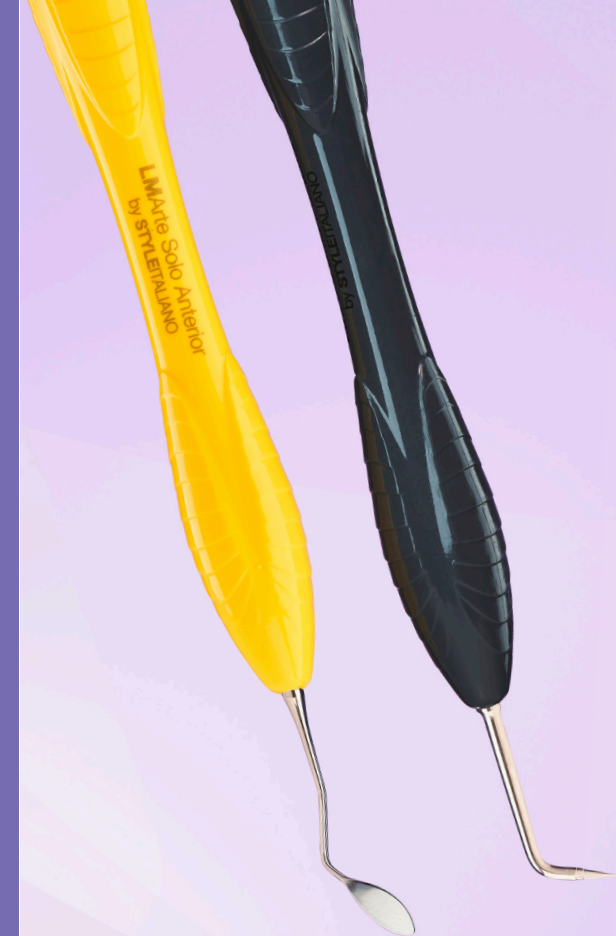

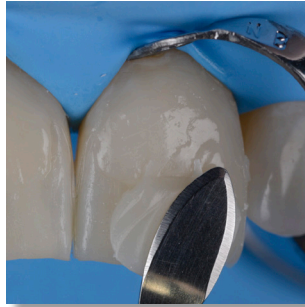

ETT INSTRUMENT FÖR DIREKTA SKALFASADER LM-Arte™ Solo Anterior

Instrument för högkvalitativa estetiska restaurationer av framtänder. Runda och raka spatlar utformade att användas för komposituppbbyggnad på framtänder, särskilt mot läppar.

Vass spets
Modellering med precision
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning

Tunt blad
Modellering mellan tänder

Konvex profil
Modellering på ett enda ställe
Skapa djupa partier
Skapa buccal profil
Skapa cervical profil
Komma åt svåråtkomliga partier

Vinklad kant
Begrepp
Skrapa

Vassa kanter
Skära, dela mitt itu och dela Sidvallar

Rundad spets
Känsliga gränsmarkeringar
Cervikala konturer

INSTRUMENTET FÖR BAKRE TÄNDER LM-Arte™ Solo Posterior

Instrument för högkvalitativa kompositrestaurationer av bakre tänder. Kompositinstrument utformat för att användas till bulkfyllning och uppbbyggnad av kompositmaterial. Med den vassa spetsen skapar du konturer på ocklusala ytor.

Platt profil
Borttagning av stort överskott
Borttagning av medelstort överskott

Platt instrumentände
Kompositinstrument

4–5 mm säkert parti för bulkfyllning
Test till bulk- och fyllnadsmaterial

Vinkling
Åtkomst vid djupa hål


Halvrunda kanter
Lutande modellering
Borttagning av överskott
Avlägsnande av plack

Spetsig profil
Avlägsna fyllningsöverskott
Lutande formgivning
Sekundär anatomi

Vass spets
Modellering med precisionsförmåga
Mikromodellering
Gränsmarkeringar
Skrapning
Flödesspridning
Avlägsnande av bubblor

LMArte™
Replica Posterior

LMArte™
Replica Anterior

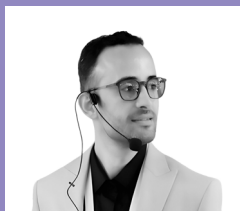

De unikt designade instrumenten LM-Arte™ Replica Posterior och Anterior för modellering av tandtyper har utvecklats i samarbete med Dr. Osama Shaalan, medlemmen i gruppen Styleitaliano™.



Anpassa



Forma



Återskapa

ÅTERSKAPA LÄTT

LM-Arte™ Replica Posterior

Smart instrument designat för att förenkla ocklusal modellering av posteriora tänder i direkta kompositrestorationer. Instrumentet gör ocklusal modellering snabb, enkel och förutsägbar. Ocklusal anatomi av en enda tand kan enkelt styras av buckal cusps med hjälp av replikteknik med detta specifika instrument. Instrumentet har en konkav och en konvex sida.

Konkav yta

- Cuspaccentuering
- Kantformande
- Cuspavgränsning
- Ta bort överflödig komposit

Böjd vass kant för

- Skära
- Dela
- Skapa skårar
- Cuspavgränsning
- Skapa kurvor

Konvex profil

- Överföra komposit
- Anpassning
- Avsmalnande skårar
- Skapa en plan yta
- Utjämning
- Skapa djupa partier

Sidokanter

- Skära
- Dela
- Skapa linjer

HOW TO USE




NYHET!



Anpassa



Forma

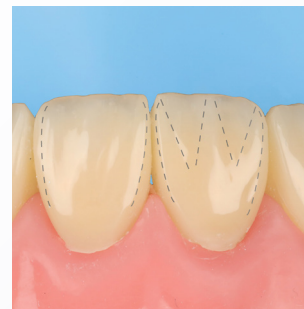

Återskapa

FÖRENKLA ANTERIOR TEKNIK

LM-Arte™ Replica Anterior

LM-Arte™ Replica Anterior är ett revolutionerande instrument för anteriora kompositrestaureringar som kombinerar enkelhet med en unik design. Instrumentet förbättrar hela arbetsflödet med början på exakt anpassning, sedan förformning av ytans anatomi och form och till sist minimering av ytbehandlingen. Det är perfekt för anpassning, formning och återskapande av tandytans anatomi.

Instrumentet har två liknande spegelvända arbetsdelar med vassa och tunna spetsar.

LM-Arte™ Replica Anterior komplimenterar instrumentet LM-Arte™ Replica Posterior: denna instrumentkombination ger en instrumentlösning för både anteriora och posteriora kompositrestaureringar.

HOW TO USE



Invändig yta

- Skapa djupa partier
- Skapa ytskåror
- Skapa konvexa ytor
- Skapa sidvallar
- Återskapa ytans anatomi

Utvändig yta

- Överföra komposit
- Skapa en plan yta
- Anpassning av yta
- Skapa djupa partier
- Skapa ytskåror
- Skapa konvexa ytor
- Skapa sidvallar
- Återskapa ytans anatomi

Böjd vass ände

- Dela
- Skära
- Formge mameloner
- Cervikal anpassning
- Modellering av incisal embrasure
- Gingival anpassning
- Överföra komposit
- Skapa skåror
- Accentueringar

Sidokanter

- Borttagning av överskottskomposit
- Formge mameloner
- Skära
- Dela





SNYGGT AVSLUT

LM-Arte™ Eccesso

Ett tandvårdsverktyg skapat för att avlägsna komposit- och häftmaterialsrester. De särskilt vinklade instrumentspetsarna på Eccesso lämpar sig utmärkt för att avlägsna överskott från cervikala anteriora och interproximala ytor. Detta smala men motståndskraftiga verktyg utmärker sig för bladets optimerade längd, tjocklek och bredd. Instrumentet är tillgängligt med "non-stick" LM Dark Diamond™-beläggning.

HOW TO USE



BLI EN DEL AV FRAMGÅNGEN!

Besök Styleltaliano™-webbplatsen på www.styleltaliano.org för att läsa om behandlingsfall och restaureringar med LM-Dental™-instrument



Följ och gå med i Styleltaliano™-gruppen på sociala medier



ÖVERVINN PROBLEMET MED TANDKÖTTSSRETRAKTION - **LMGengiva™**

Syftet med restaurerande behandling av en cervikalskada är att uppnå en perfekt försegling, stark bindning och utmärkt polering av kompositmaterialet. Mekanisk tandkötsretraktion vid cervikala restaureringar kan vara traumatisk om den inte utförs på rätt sätt.

Instrumentet LM-Gengiva™ med tandkötsretraktorer används för att undvika att tandköttet skadas i onödan och för att uppnå bästa behandlingsresultat. Med hjälp av denna metod uppnås önskat slutresultat: mjukvävnaden skadas inte och estetiska krav kan uppfyllas.



TANDKÖTTSSRETRAKTORER

- retraherar tandköttet från restaureringen
- den hårda plastspetsen medger en kraftig retraktion
- plastspetsarna ger viss flexibilitet för mer anpassning under tryck
- spetsen verkar som en tät försegling mellan tandköttet och tanden
- skyddar tandköttet och minskar sannolikheten för misslyckande fixeringar
- bondingytan och tandköttskanten syns tydligt; perfekt kontrast mot mjukvävnader
- kan anpassas med borr borr för att passa konvex eller konkav tandrot
- spetsens yta fastnar inte på bondingmaterialet
- ingen interferens med polymeriseringen
- för engångsbruk



LM-Gengiva™ Tandkötsretraktionsset

LMErgoSense® 7556KES

LMErgoMax™ 7556KXSI

Innehåller instrumentet LM-Gengiva™, blå tandkötsretraktorer (förpackning med ca 90 st, 30 st/storlek) och LM-MultiLever™ för avlägsnandet av plastände.

LMDental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finland

Tel. +358 2 4546 400

info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

