

LM™ Extraction

LM

feel the
difference



Extracciones fiables

LM LiftOut™

LM LiftOut™


Instrumentos de luxación para realizar extracciones atraumáticas

Los instrumentos LM-LiftOut™ permiten la extracción de piezas dentales de la forma menos traumática posible. Esto es muy importante para lograr una cicatrización rápida y colocación del implante en el futuro. La fina punta del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice de la raíz dental mientras se gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-LiftOut™ no es apto para usar como elevador dental.



Ángulos y dimensiones

Hoja recta

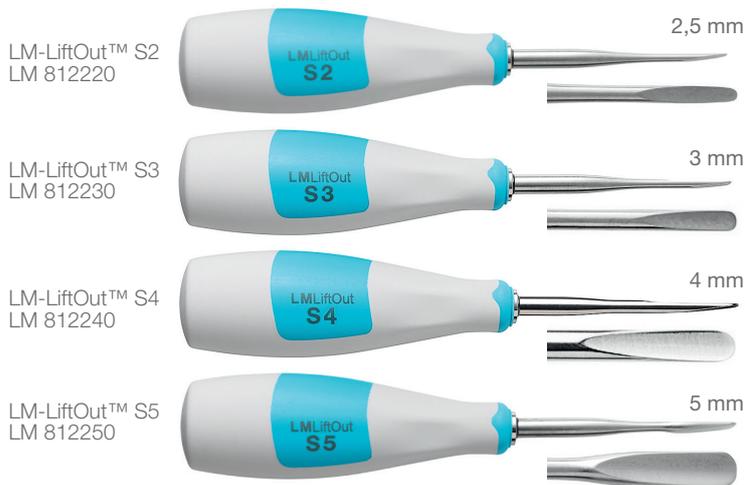

Hoja curvada



Extracciones fiables y luxaciones atraumáticas

La ergonomía y la sensibilidad táctil propias de LM™ aplicadas al instrumental de extracción.

| Características de LM™ | Ventajas |
|---|---------------------------------------|
| Diseño ergonómico | – sujeción cómoda y rotación sencilla |
| Superficie segura LM-ErgoTouch™ | – ligera, antideslizante |
| Equilibrio óptimo | – agarre controlado |
| Ligereza | – más fácil de manejar |
| Codificación clara por colores | – identificación sencilla |
| Acero superior LM-DuraGradeMAX™ | – puntas más fuertes y afiladas |
| Junta estrecha sólida en el empalme con la hoja | – mayor higiene |



Instrumentos de extracción LM™
clasificados como mejor producto 2014.




¡Escanee el código QR
para la valoración
completa!

LM SlimLift™

Instrumentos de luxación diseñados para las zonas sumamente estrechas

Los instrumentos LM-SlimLift™ están especialmente diseñados para llegar a las zonas de difícil acceso a las que los instrumentos de luxación tradicionales no pueden acceder. Permiten las extracciones de piezas dentales de la forma menos traumática posible. Esto es muy importante para una cicatrización rápida. La punta ultra fina del instrumento se introduce en el espacio periodontal y avanza lentamente hacia el ápice mientras se gira suavemente el instrumento hacia atrás y hacia delante. LM-SlimLift™ no es apto para usar como elevador dental.

El diseño extremadamente fino de la hoja permite las extracciones más atraumáticas posibles.

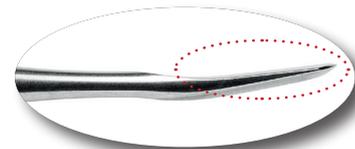

Los instrumentos finos LM-SlimLift™ son una solución mucho más traumática

Dr. Peter Jungell
Médico, odontólogo y cirujano maxilofacial



“Actualmente utilizo los instrumentos LM-SlimLift™ para casi todas las extracciones. También utilizo mis instrumentos de luxación anteriores preferidos, mientras que el uso del instrumental tradicional se ha vuelto menos frecuente.

El instrumental de luxación fino de LM™ puede introducirse en espacios periodontales particularmente estrechos. Cuando se emplean instrumentos anchos, la fuerza de luxación se disemina sobre una zona más amplia hacia los laterales y más profunda hacia el ápice de la raíz, de modo que el riesgo de fractura, sobre todo de las raíces frágiles, se limita considerablemente. La mayoría de las extracciones pueden realizarse con instrumentos de luxación sin necesidad de aplicar ninguna otra medida operativa.

El diseño y el material del instrumento LM-SlimLift™ garantizan un

agarre excelente del instrumento. En un primer momento, los mangos pueden resultar demasiado grandes, pero en las tareas clínicas se adaptan a la mano perfectamente. El instrumento puede sujetarse en la palma de la mano o solo con los dedos. Resulta fácil elegir un instrumento apto para cualquier tarea clínica entre la amplia selección de tamaños. Las hojas anchas son idóneas para la extracción de los molares inferiores, mientras que las puntas finas son perfectas, por ejemplo, para la extracción de las raíces estrechas de los dientes superiores.

Recomiendo los instrumentos LM-SlimLift™ a todos los dentistas: me parece sensato prescindir por completo de los instrumentos antiguos e ineficientes. Con demasiada frecuencia se oye hablar de casos en los que el tratamiento de la raíz ha llegado a durar hasta dos horas”.

Ángulos y dimensiones

Hoja recta



Hoja curvada



LM TwistOut™

LM TwistOut™

Elevadores dentales para extracciones que requieren fuerza

Los instrumentos LM-TwistOut™ son aptos para extracciones dentales en situaciones que requieren la aplicación de gran fuerza o torsión.



“Este elevador dental de la gama de instrumentos LM™ está especialmente diseñado para las aplicaciones de torsión”

Bite Magazine, agosto de 2014,
Dr. Davis Lakatos,
Complete Dentistry, Kilcoy, QLD, Australia

“Conocí este elevador en el Congreso Australiano de Odontología, celebrado en Melbourne el año pasado. Como trabajamos en el ámbito rural y, probablemente practicamos más extracciones que en las zonas urbanas, es una herramienta muy útil.


Considero que los luxadores suelen ser bastante finos y propensos a doblarse o romperse si se ejerce demasiada presión. Este elevador dental de la gama de instrumentos LM™ está especialmente diseñado para las aplicaciones de torsión.

Lo utilizo en todas las extracciones porque existe una gama completa de modelos curvos y rectos en todos los tamaños. Es un instrumento muy resistente y sencillo que facilita mucho las extracciones.


A menudo me he preguntado por qué no existía un luxador más resistente en el mercado, pero resulta que este elevador es precisamente lo que estaba buscando”.

Ángulos y dimensiones

Hoja recta

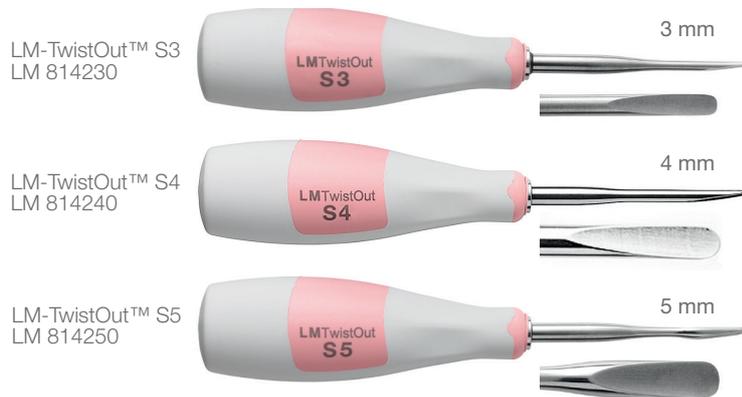

Hoja curvada

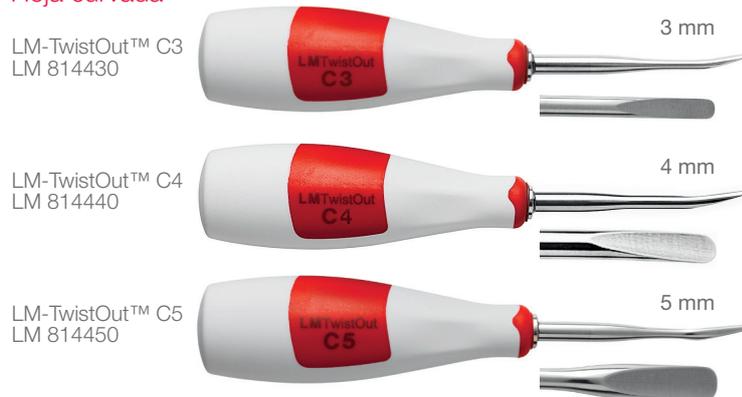

Mantenimiento fácil

Caja LM 810001

El instrumental de extracción se suministra con una cómoda cassette que protege tanto al instrumento como al profesional durante el ciclo de mantenimiento. La caja impide que el instrumento perfora la bolsa de esterilización, por lo que resulta más sencillo garantizar esta. La caja se puede codificar por colores.

Piedra de afilar LM 818002

Las hojas acabadas a mano y fabricadas con acero superior LM-DuraGradeMAX™, se mantendrán afiladas y durarán más tiempo si se utilizan y se cuidan correctamente. Afíle de vez en cuando el instrumental de extracción con esta piedra de afilar redonda; se trata de una forma rápida y sencilla de mantenerlo en buen estado y siempre listo para usar.



Elevadores para rápices radicales

Root Tip Pick LM 769-771 XSI/ES

- para extraer los ápices radicales
- excelente para tratamientos de las zonas de difícil acceso



LM-RootOut™ LM 812210

- diseñado para las maniobras más delicadas de preparación de la raíz
- no recomendado para una extracción mayor de los ápices radicales
- similar a los instrumentos para la extracción de ápices radicales Heidbrink
- mango ergonómico para un agarre cómodo



LM Dental™

 LM-Instruments Oy

Norrbyn rantatie 8 | FI-21600 Parainen | Finlandia
info@lm-dental.com | www.lm-dental.com

