

Hinweise zum Gebrauch des **LM LiftOut** -Instruments


Verwendung

LM-LiftOut -Instrument für die Zahnextraktion. Mithilfe dieses Instruments kann die Zahnextraktion unter Bewahrung von Gewebe und Alveolarknochen so atraumatisch wie möglich durchgeführt werden. Unter solchen Bedingungen kann die Wunde zügig verheilen und bei Bedarf anschließend mit einem Implantat versorgt werden.



Hinweis!

Das LM-LiftOut Instrument wurde, seinem Verwendungszweck entsprechend, mit einer besonders dünnen Spitze ausgestattet. Eine falsche Extraktionstechnik, ein zu hoher Kraftaufwand oder eine Verwendung als Hebel kann die Spitze beschädigen.

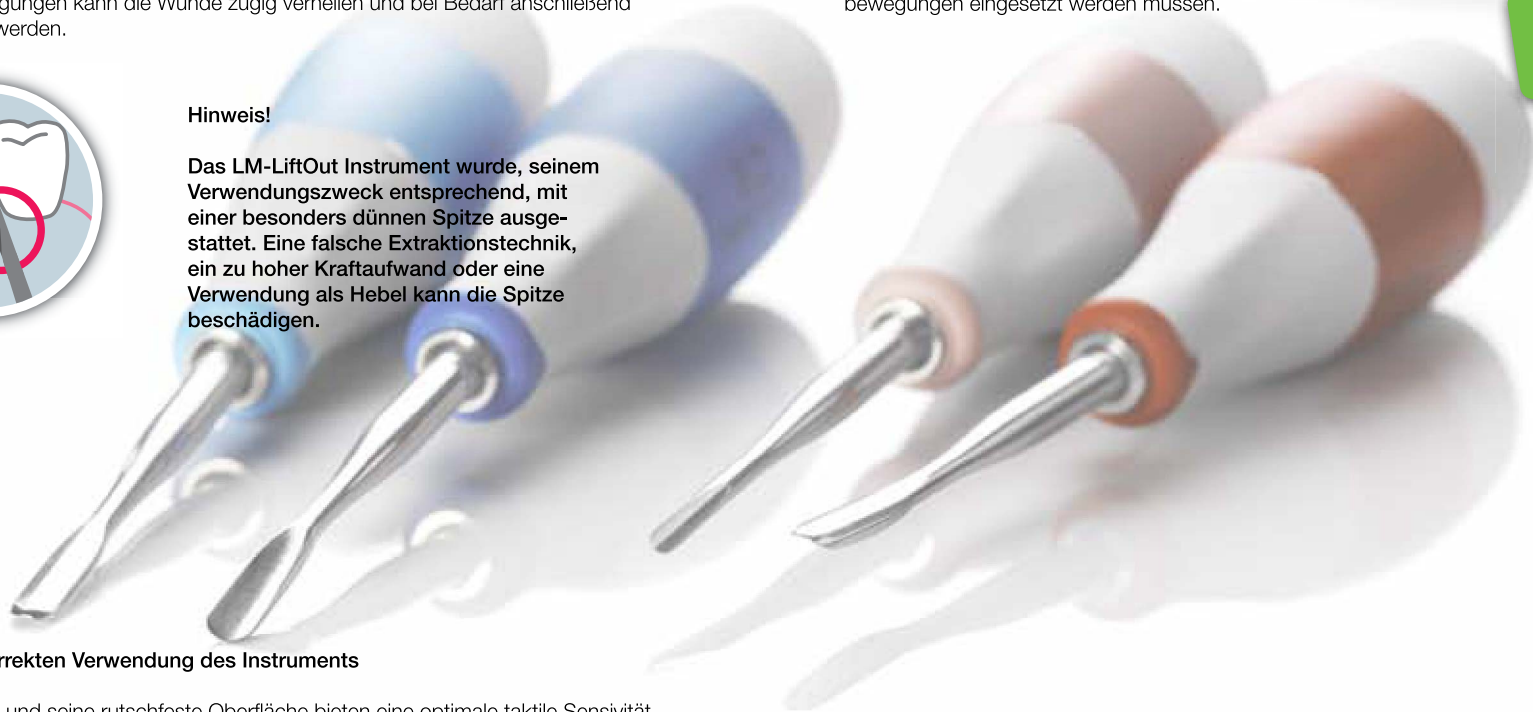

Hinweise zum Gebrauch des **LM TwistOut** -Instruments

Verwendung

LM-TwistOut -Instrument für die Zahnextraktion. Dieses Instrument sollten Sie in Situationen verwenden, in denen Kraft und Hebelbewegungen eingesetzt werden müssen.



Allgemeine Hinweise zur korrekten Verwendung des Instruments

Die Ergonomie des Handgriffs und seine rutschfeste Oberfläche bieten eine optimale taktile Sensivität.

1. Setzen Sie die Spitze des Instruments am Spalraum möglichst axial in Richtung Zahnwurzel an.
2. Arbeiten Sie sich mithilfe von Luxationsbewegungen in Richtung der apikalen Wurzelspitze vor. So lösen Sie den Zahn langsam aus seinem Zahnfach.
3. Wiederholen Sie, wenn nötig, diese Vorgehensweise rund um den Zahn.
4. Sollte der Zahn sich noch nicht aus dem Zahnfach gelöst haben und Sie müssen für dessen Entfernung Hebelbewegungen anwenden, dann sollten Sie auf ein Instrument wechseln, das dem benötigten Kraftaufwand standhält (**LM-TwistOut**).



MAX. 134°C/273°F

LM feel the difference

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444