

LM LiftOut -instrumentin käytön opastus

Käyttö

LM-LiftOut -instrumentti on suunniteltu hampaiden poistamiseen. Instrumentin avulla poisto voidaan suorittaa mahdollisimman atraumaattisesti kudosta ja alveoliluuta säästäten. Tämä on tärkeää nopean paranemisen ja mahdollisen myöhemmän implantoinnin mahdollistamiseksi.



Huomautus!

LM-LiftOut -instrumentin kärki on sen käyttökohteen ja käyttötavan vuoksi suunniteltu erityisen ohueksi. Väärä poistotekniikka, liiallinen voimankäyttö tai vipuaminen saattaa vahingoittaa kärkeä.

Tekniikka

Kahvan ergonomia ja lipsumaton otepinta mahdollistavat optimaalisen tuntoherkkyyden.

1. Vie kärki hampaan parodontaalirakoon mahdollisimman aksiaalisesti juureen nähden.
2. Jatka hivuttamalla kärkeä kohti juuren apikaalista osaa painamalla sitä ja samalla edestakaisin hellävaroin kiertäen. Alveolikuopan luu puristuu ja hammas pääsee nousemaan kuopastaan.
3. Toista toimenpide tarvittaessa hampaan eri puolilta.
4. Mikäli hammas on edelleen kiinni ja sen poistoon tarvitaan vipuamista, valitse voimankäyttöä kestävä **LM-TwistOut** -instrumentti.



LM TwistOut -instrumentin käytön opastus

Käyttö

LM-TwistOut -instrumentti on suunniteltu hampaiden poistamiseen. Instrumenttia on edullista käyttää tilanteissa, joissa voimankäyttö ja vipuliikkeet ovat tarpeellisia.



MAX. 134°C/273°F

LM feel the difference

LM-Instruments Oy
PL 88 (Norrbyn rantatie 8)
FI-21601 Parainen
Tel. +358 2 4546 400
Fax +358 2 4546 444