

# LM-ProPower AirLED QuickGuide

LM

feel the  
difference

DVD: 

## Kontrollpanelen:

Aktivera polishern genom att trycka på ON knappen, välj sedan effektområde.



60 %

eller




100 %

Genom att trycka upprepade gånger på ON knappen hoppar du mellan:

1. Normalt polisherläge
2. Air-Blow (endast luft)
3. Water-Jet läge (endast vatten och luft)

Maskinen är i **viloläge** när nätsladden är ansluten och den gröna lampan är tänd.

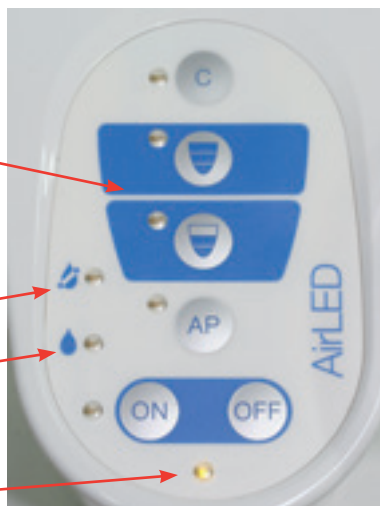

## Renblåsningssfunktion (Air purge):

Ett tryck på **AP**-knappen blåser rent handstycket i några sekunder. Detta bör göras efter varje behandling för att motverka pulverstopp.

## Rengöring/spolningsfunktion::

Rengöringen startas genom att trycka på **C** knappen. Vatten eller desinfektionsmedel och luft rengör handstycket. Rengöringscykel stannar automatiskt efter **80 sekunder**.

För att stänga av maskinen tryck på **OFF** knappen.



## Vattenreglering:

Tryck ner fotpedalen och minska långsamt vattenflödet med regleringen på sidan av pulverbehållaren tills pulvret börjar ansamlas på ytan som en vit fläck. Öka vattenflödet tills fläcken försvinner. Polishern är nu inställd för optimal prestanda.



## Fotpedalen:



Polishern **aktiveras** när fotpedalen trycks ner. Polishern regleras från: vänster / ZERO = WaterJet mitten och höger MAX = 60 eller 100% beroende på vilket effektområde som valts på kontrollpanelen.

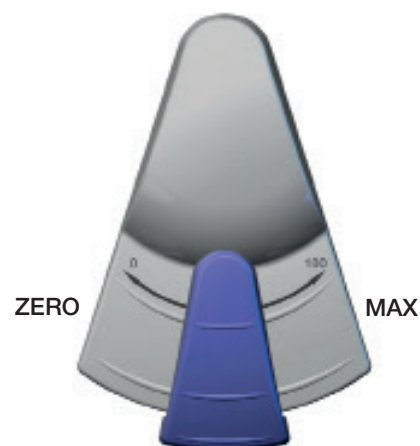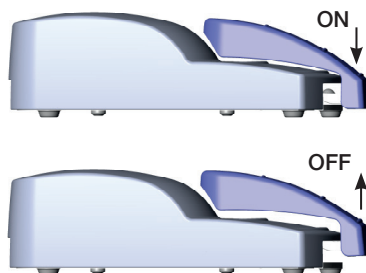

Problem? Se avsnittet felsökning i användarmanualen.

OBS! Före installation och användning av maskinen, var vänlig läs manualen.


1. Anlita en behörig tekniker för att ansluta maskinen till luft och ev. vattentillförsel.
2. Anslut fotpedalkabeln till fotpedalen och sedan till maskinen.
3. Anslut nätkabeln till maskinen och till eluttaget.

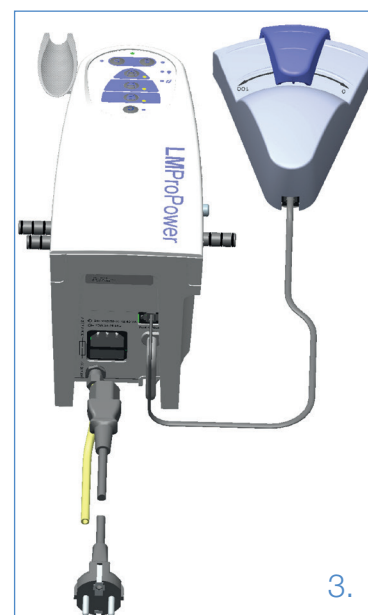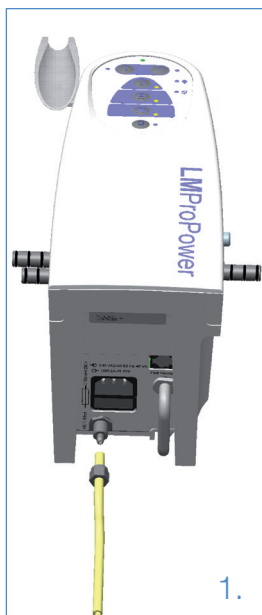

4. Fyll vätskebehållaren med vatten eller läkemedelslösning, skruva på flasklocket på vätskebehållaren och skjut på den på anslutningen till vänster.
5. a. Skruva loss pulverburken från locket och fyll på med LM-ProPower pulver upp till MAX. Skruva fast pulverburken i locket.
5. b. Skjut på burken på anslutningen på höger sida av maskinen.



6. Skjut försiktigt på ett LM-ErgoGrip på polisher handstycket. För in polishermunstycket i handstycket och skruva medsols tills det är ordentligt åtdraget.

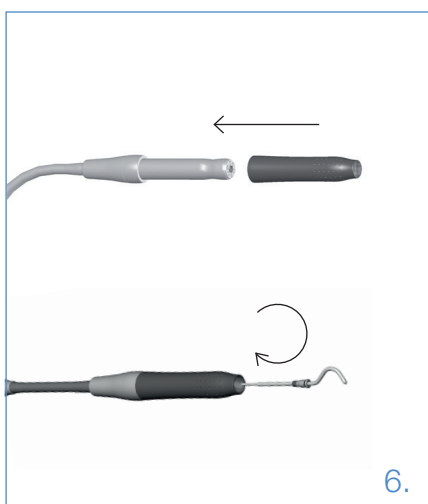

7. Se avsnittet **Användning** i manualen.



**LM**Dental  
LM-Instruments Oy  
Norrbyn rantatie 8  
FI-21600 Parainen  
Finland  
+358 2 4546 400  
info@lm-dental.com  
www.lm-dental.com

0517\_9770409B