

LM-ProPower CombiLED QuickGuide

LM

feel the difference

DVD: 

Ultraschallgerät

Um den **Scaler zu anschalten**, auf die **S-Taste** drücken und danach richtiger Arbeitsmodus wählen, welcher auf jeder Spitze markiert ist:



Beim weiter drücken auf die **S-Taste** können zwischen folgende Funktionen geschaltet werden:

1. Scaling mit Wasser
2. Scaling ohne Wasser (Trockenbetrieb)
3. Spülfunktion: nur Wasser, keine Scaling

Wasserregulierung:

Drücke das Fußpedal in seiner ganz linken Position und reguliere den Wasserspray mit dem Reglering auf dem Handstück bis das Wasser aus dem Handstück herunter tropft.

Der Scaler ist **aktiviert**, wenn das Fußpedal nach unten gedrückt ist. Die Leistung wird von Links/NULL nach Rechts/MAX innerhalb des gewählten Arbeitsmodus reguliert. In **NULL Position** gibt es zwei Funktionen:

- a) Spülung mit keinerlei Scalingleistung: drücke das Fußpedal herunter.
- b) Diagnostische Licht: drücke einmal auf dem Fußpedal.




Vollreinigungsfunktion:

Den Scaler ausschalten beim Drücken auf die **S-Taste** für ein paar Sekunden.

Die Reinigungsfunktion starten beim Drücken zuerst auf die **C-** und danach die **S-Taste**. Wasser oder Desinfektionsmittel reinigt die Wasserleitung und den Handstück. Der Reinigungszyklus endet automatisch nach **80 Sekunden**.

Ausschalten des Scalers: die **S-Taste** für 3 Sekunden lang drücken.

Das Gerät ist **funktionsbereit**, wenn das Netzkabel angeschlossen ist und wenn das grüne LED-Licht leuchtet.

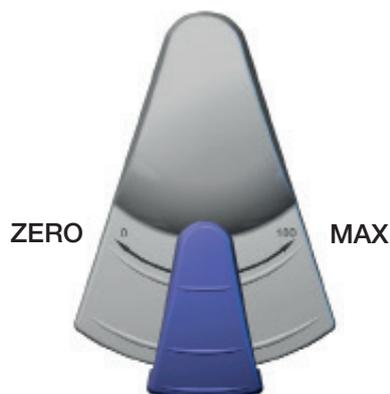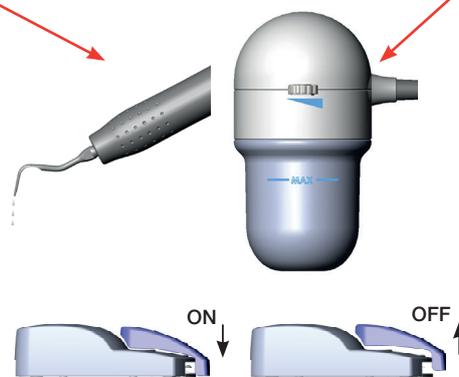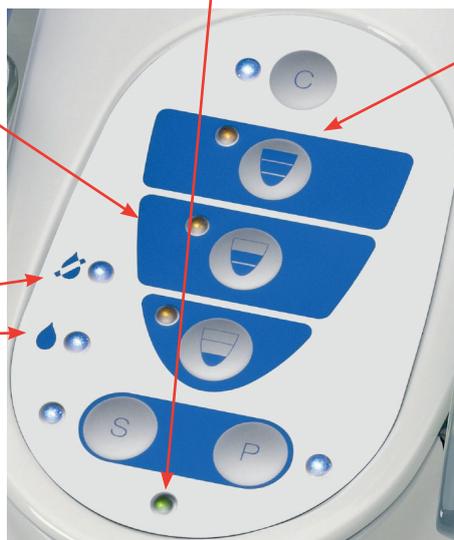

Polisher

Um den **Polisher zu anschalten**, auf die **P-Taste** drücken und danach richtiger Arbeitsmodus wählen.



Dieser Arbeitsmodus kann beim Polisher nicht aktiviert werden.



Beim weiter drücken auf die **P-Taste** können zwischen folgende Funktionen geschaltet werden:

1. Normales Polishing
2. Luftreinigung (nur Luft)
3. Wasserstrahlreinigung (nur Wasser und Luft)

Wasserregulierung:

Drücke das Fußpedal und verringere den Wasserfluß mit dem Regulator auf der Seite des Pulverspenders bis das Pulver fängt an zu akkumulieren, sodaß auf der Oberfläche der Schüssel ein weißer Flecken entsteht. Erhöhe den Wasserfluß bis der weiße Flecken verschwindet. Der Polisher ist jetzt auf eine optimierte Leistung balanciert.

Der Polisher ist **aktiviert**, wenn das Fußpedal nach unten gedrückt ist. Die Polishing leistung wird folgenderweise reguliert: Links/NULL = Wasserstrahl (nur Wasser und Luft). Mitte & Rechts/MAX = von **60 bis 100%** je nachdem, welcher Arbeitsmodus vom Steuerpaneel gewählt worden ist.

Schnellreinigungsfunktion mit Luftspülung:

Um Verstopfungen zu verhindern, das Handstück nach jeder Polishingbehandlung mit Luftspülung reinigen beim Drücken auf die **C-Taste**.

Vollreinigungsfunktion:

Den Polisher ausschalten beim Drücken auf die **P-Taste** für ein paar Sekunden. Die Reinigungsfunktion kann gestartet werden beim Drücken zuerst auf die **C-** und danach auf die **P-Taste**. Wasser oder Desinfektionslösung (40 s) und Luft (40 s) reinigt das Handstück. Der Reinigungszyklus endet automatisch nach **80 Sekunden**.

Ausschalten des Polishers: die **P-Taste** für 3 Sekunden lang drücken.


LM-ProPower CombiLED Installation

ACHTUNG! Vor der Installation und Inbetriebnahme des Gerätes lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.



1. Beim Installieren der Luftzufuhr und ggf. der Wasserzufuhr bitte einem qualifizierten Techniker konsultieren.
2. Schließe den Fußpedalkabel an dem Fußpedal und auf der Rückseite des Geräts.
3. Schließe das Netzkabel an dem Gerät und an die Steckdose.



4. Fülle den Medikamentenspender mit Wasser oder Medikamentenlösung, schraube den Flaschenkonnektor an die Flasche und drücke diesen zu dem Anschlussstecker auf der linken Seite des Gerätes.
5. a. Schraube den Pulverspender ab und fülle diesen mit LM-ProPower Polisher-Pulver bis zu MAX. Schraube den Pulverspender zurück an die Kappe.
5. b. Schließe den Pulverspender an den Konnektoren auf der rechten Seite des Geräts.

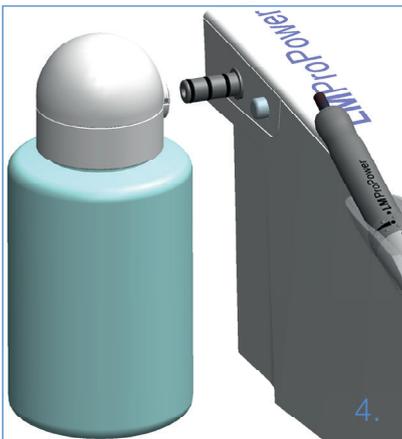

6. a. Setze den LM-ErgoGrip vorsichtig auf dem Polisherhandstück. Schraube die Polisherdüse rechtsdrehend in dem Polisherhandstück ein bis die Düse fest sitzt.
6. b. Setze den LM-ErgoGrip vorsichtig auf dem Scalerhandstück. Stecke die Spitze in die Drehmomentschlüssel ein und schraube die Spitze mit Hilfe der Drehmomentschlüssel rechtsdrehend auf die Scalerhandstück ein. Ziehe fest so lange die Drehmomentschlüssel gibt nach und rutscht ab.

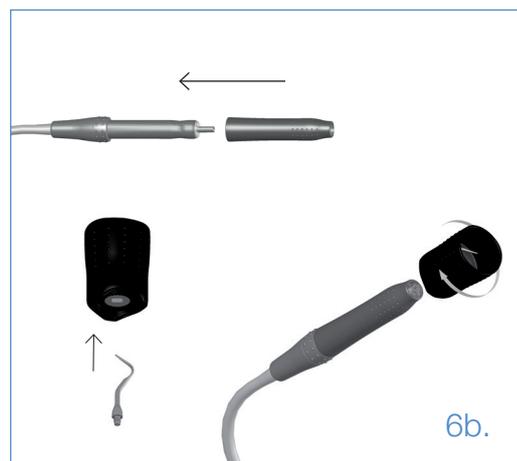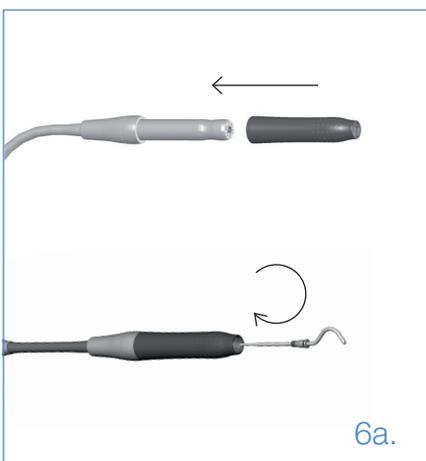

7. Lesen Sie aus der Bedienungsanleitung das Kapitel "Funktionsanweisungen".